


FIND4NOW™

On-Farm-Schnelltest

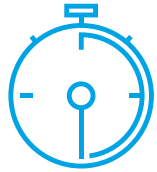

10 MIN

- Die Ergebnisse sollten nach 10 Minuten abgelesen werden, nicht früher oder später.



SICHERSTELLUNG DER ERGEBNISSE

- Falls sich ein Teststreifen im Röhrchen verschiebt (sich vom Boden ablöst), verwenden Sie den Spatel aus dem Kit, um es richtig zu positionieren.
- Bei Verwendung des Testkits ist darauf zu achten, ob die Teststreifen die Flüssigkeit absorbieren. Falls das nicht der Fall ist, kann durch das Klopfen des Streifenröhrchen auf eine harte Oberfläche wie ein Tisch nachgeholfen werden. (siehe auch Punkt 9 in der Anleitung).



MISCHEN

- Wenn Sie eine trockene Kotprobe testen möchten, kann das Homogenisieren/ Mischen der Probe schwierig sein. Mischen Sie die Probe so gut es geht und achten Sie darauf, dass die Streifen nicht koagulieren und die Flüssigkeit aufsaugen. (Ansonsten klopfen Sie das Röhrchen auf eine harte Oberfläche).

Tips & Tricks

CHR HANSEN

Improving food & health