




FIND4NOW™

Quick test af patogener på bedriften

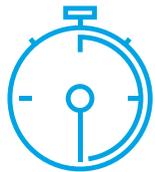

10 MIN

- Resultaterne skal aflæses efter præcist 10 minutter.



SIKRING AF RESULTAT

- Hvis en af strimlerne inde i røret forskydes (løfter sig fra bunden af røret), skal du bruge spatlen i sættet til at skubbe den ned.
- Når du bruger testen, skal du være opmærksom på, om strimlerne absorberer væsken. Hvis de ikke gør det, kan dette muliggøres ved at banke røret mod en fast overflade, f.eks. et bord (som også beskrevet i instruktionsarket, nr. 9).



SAMMENBLANDING

- Hvis der testes tørt fækkalt materiale, kan homogenisering/blanding af prøven med væsken være vanskelig. Bland så godt som muligt og vær ekstra opmærksom på, at strimlerne kan størkne og ikke suge væske (i dette tilfælde kan røret bankes mod en fast overflade).

Tips & Tricks

CHR HANSEN

Improving food & health