


# FIND4NOW™

Test rapide en élevage

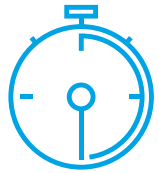

## 10 MIN

- L'obtention des résultats est garantie en 10 minutes.



## ATTEINTE DES RÉSULTATS

- Si l'une des bandes à l'intérieur du tube se disloque (se soulève du bas du tube), utilisez la spatule fournie dans le kit pour la pousser vers le bas.
- Lors de l'utilisation du kit, vous devez faire attention à ce que les bandelettes absorbent le liquide. Dans le cas contraire, cela peut être facilité en tapotant les tubes contre une surface ferme, par exemple une table (comme décrit également dans la fiche d'instructions n° 9).



## MÉLANGE

- Si vous testez des matières fécales sèches, homogénéiser/mélanger l'échantillon avec le liquide peut être difficile. Mélangez le mieux possible et faites très attention à ce que les bandelettes ne coagulent pas et n'absorbent pas de liquide (si tel est le cas, le tube peut être tapoté contre une surface ferme).

Suggestions

CHR HANSEN

*Improving food & health*