

# FIND4NOW™

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SZYBKIEGO TESTU NA OBECNOŚĆ PATOGENÓW NA FARMIE

Enterotoksyczne *E. coli* F4 & F18, *Clostridium perfringens* i *Clostridium difficile* w kale świń



1

Pobrać kał bezpośrednio z odbytu świni. Jeśli próbki są płynne, pobrać pełną łyżeczkę.



2

Jeśli kał ma postać stałą, usunąć jego nadmiar za pomocą łopatki.



3

Rozcieńczyć jego zawartość w płynie małej probówki o nazwie "sample tube".



4

Potrząśnij probówką, aby dobrze ujednocilić próbkę.



5

Stuknij probówką o twardą powierzchnię, aby cały płyn zebrał się na dnie probówki.



6

Rozerwać aluminiową osłonę w miejscu nacięcia. Po wyjęciu urządzenia z koperty jego żywotność jest krótkotrwała, zwłaszcza w wilgotnym środowisku.



7

Włożyć "sample tube" z próbką do próbówki z paskami.



8

Przykręcić górną część próbówki z paskami.

Muszą być słyszalne dwa oddzielne kliknięcia, oznaczające perforację górnej i dolnej przegrody próbówki.

Pozostawić urządzenie pionowo na **płaskiej powierzchni** i odczekać 10 minut.

Płyn zawarty w próbówce przemieszcza się do próbówki z paskami i powoli migruje wzdłuż pasków.




9

Czasami, zwłaszcza gdy próbka nie jest ujednorodniona, migracja cieczy może zatrzymać się na jednym lub kilku paskach. W takim przypadku należy postukać końcem próbówki o twardą powierzchnię, aby umożliwić ponowne rozpoczęcie migracji.



10

Po 10 minutach odczytać wyniki używając zdjęcia 11 jako standard.

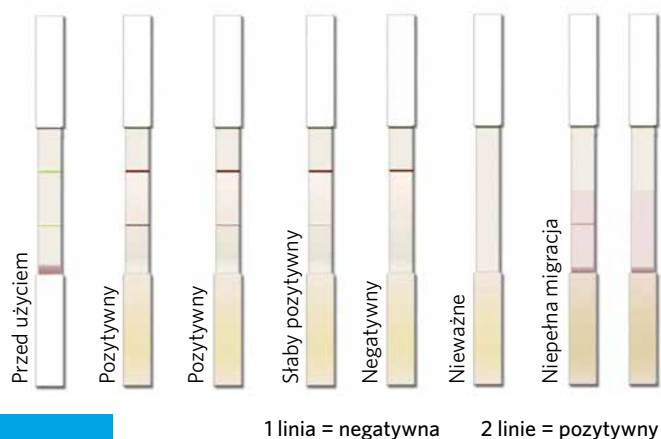

11

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Przechowywać zestawy w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Podczas przeprowadzania testu należy użyć rękawiczek jednorazowych.
- Analizowana próbka nie powinna być zbyt skoncentrowana. Nie powinno się używać próbki o objętości większej niż łyżeczka.
- Zutylizować urządzenie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami biologicznymi.