




# FIND4NOW™

Test rapido in azienda

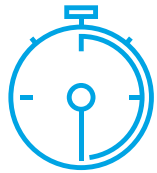

## 10 MIN

- I risultati devono essere letti dopo 10 minuti, ne prima o dopo.



## GARANTIRE I RISULTATI

- Se una delle strisce all'interno del tubo si disloca (si solleva dal fondo del tubo) utilizzare la spatola nel kit per spingerla verso il basso.
- Quando si utilizza il kit, è necessario prestare attenzione al fatto che le strisce assorbano il liquido. In caso contrario, ciò può essere facilitato battendo la provetta contro una superficie stabile, ad esempio, un tavolo (come descritto anche nella scheda di istruzioni, n. 9).



## MISCELAZIONE

- Se si effettua il test su feci secche, l'omogeneizzazione/miscelazione del campione con il liquido può risultare difficile. Mescolare il più possibile ed prestare molta attenzione al fatto che le strisce potrebbero coagulare e non assorbire liquido (in questo caso, la provetta può essere leggermente sbattuta contro una superficie stabile).

Suggerimenti

CHR HANSEN

*Improving food & health*