


# FIND4NOW™

Szybki test na farmie

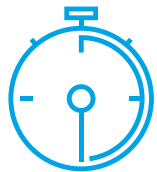

## 10 MIN

- Wyniki należy odczytać dokładnie po 10 minutach, nie później ani wcześniej.



## ZAPEWNIENIE WYNIKÓW

- Jeśli jeden z pasków wewnątrz pojemnika przesunie się (podniesie się z dna), użyj szpatułki znajdującej się w zestawie, aby go docisnąć.
- Podczas korzystania z zestawu należy zwrócić uwagę na to, czy paski wchłaniają płyn. Jeżeli nie, można to ułatwić uderzając pojemnikiem o twardą powierzchnię np. stół (jak opisano również w instrukcji nr 9).



## MIESZANIE

- W przypadku badania suchego kału homogenizowanie/mieszanie próbki z płynem może być utrudnione. Wymieszaj próbkę tak dokładnie jak to możliwe zachowując szczególną ostrożność, aby paski nie utknęły, nie wchłaniając płynu (w tym przypadku pojemnikiem można uderzyć o twardą powierzchnię).

Wskazówki i  
porady

CHR HANSEN

*Improving food & health*